


# Pistolet Jetwax Notice d'utilisation Jetwax 2016

Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation.

Le pistolet à cire Jetwax est destiné uniquement à la confection de prothèse dentaire, c'est à dire, au modelage de complet ou de partiel, confection de cire d'occlusion ou de porte empreinte individuel, au transfert de wax-up etc. Ce pistolet permet l'adjonction ou le retrait de cire en fusion à l'aide d'un système de pompage et d'injection, rechargé au moyen d'un bac indispensable, contenant de la cire liquide en fusion, style (Waxprofi Renfert ou Wax Pot ou autre) réglé entre 65° à 80° environ.

Anciennement le Wax Pot était livré avec le Kit qui n'est plus disponible, mais visible sur les photos dans le mode d'emploi ou sur le site avec les vidéos.

Etendue de la livraison : 1 x Jetwax, (pistolet à cire) prise DC 12V.

1 X support (tube transparent) pour recevoir la pointe du pistolet. 1 x adaptateur : input : 110- 240v-50/60 output : 12V  2-3A

Utilisation et conseil : 1 Retirer la protection de la buse du pistolet (tube plastic) 2 Branchez à une prise du courant : a) La fiche mâle de l'adaptateur et la prise DC 12V au pistolet Jetwax. b) La prise du bac à cire (Waxprofi Renfert ou Wax Pot) et enclencher son interrupteur, réglage de la température, (Waxprofi Renfert ou Wax Pot) préréglage 65°- 80° augmenter ou diminuer la température afin qu'elle soit la plus basse possible pour le raccourcir le temps de durcissement, au besoin il est facile de surchauffer la pointe du pistolet sur la flamme et la cire sera plus fluide.

3 Une fois chaud 5-9 minutes le travail peut commencer de la manière suivante: a) Introduire le bec du pistolet dans le bac à cire en fusion en s'appuyant sur le bord, de façon que la pointe ne touche pas le fond et ne s'obstrue pas, par les impuretés du fond de cire.

Il est possible de modifier la pointe de la buse à son extrémité avec une gomme abrasive par petites touches de l'affiner, mais elle sera plus délicate.

b) Actionner le piston à plusieurs reprises afin d'expulser l'air et assurer le remplissage complet du réservoir.

c) Relâcher le piston, sortir le pistolet de la cire et recommencer votre travail.

4 Attention n'utilisez qu'une seule sorte de cire à la fois. Dans le cas contraire, veuillez vous assurer que l'appareil soit bien vide avant de changer de cire.

5 Si le remplissage du réservoir du pistolet est entravé :a) Retirer le piston avec un chiffon afin d'éviter toute brûlure et veillez à ce que le ressort soit maintenu soit sur le piston soit à l'intérieur du cylindre. b) Introduisez la pointe du pistolet à l'extrémité de votre soufflette afin d'éjecter tous les résidus à l'aide de l'air comprimé en direction d'un papier absorbant, si l'orifice de la buse est bouché, introduire un forêt ou un fil de 0,6 mm de diamètre.

**Important :** c) Replacer le piston chaud avec une petite couche de cire rose en fusion sur sa surface dans le Jetwax, c'est elle qui lubrifie et protège le joint.

6 Pour éviter tout problème, veillez au maintien de la propreté de votre bac à cire (Waxprofi Renfert ou Wax Pot), pour le nettoyer et assainir votre cire: Introduire un couteau à cire chaud dans la cire froide du bac à cire éteint donc froid, laisser la cire se figer. b) Allumer le (Waxprofi Renfert ou Wax Pot) pour le chauffer et sortir le bloc de cire encore froid et à l'aide du couteau éliminer la cire impropre en coupant des lamelles. c) Replacer la cire dans le (Waxprofi Renfert ou Wax Pot)

7 Déposez le pistolet sur son support ou une surface résistante à la chaleur.

8 Une fois que le pistolet ne sert plus, débranchez sa fiche mâle de la prise électrique.

Consignes de sécurité, utiliser qu'avec l'alimentation fournie avec l'appareil. Risque de brûlures par la cire très chaude. Evitez tout contact avec l'eau et avec des solvants.

Attention: Les appareils ne doivent jamais être nettoyés à la vapeur ou à l'eau, uniquement à l'aide d'un chiffon ou l'air comprimé, afin de ne pas endommager le mécanisme.

2

**ATTENTION!** Les appareils et accumulateurs inutilisables ne doivent pas se retrouver dans des déchets domestiques! Ils doivent être rassemblés séparément conformément à la directive 2002/96 CE concernant les vieux appareils électroniques et doivent être réutilisés selon les règles de l'art dans l'intérêt de l'environnement. Veuillez acheminer les appareils électriques inutilisables à une déchetterie locale. Collecter les matériaux d'emballage triés selon leur nature et les éliminer conformément aux dispositions locales en vigueur. Renseignez-vous auprès de votre administration municipale pour plus de détails.

(F) Garantie X (D) Garantie (I) Garanzia (GB)Guarantee X (P)  
Garantia

(E) Garantia (HR)Garancijski

2 ans Garantie Jetwax.

Le bon de garantie n'est valable qu'avec le bon d'achat. Veuillez conserver soigneusement ces deux documents. Pour les réparations et les cas relevant de la garantie, veuillez vous adresser à votre vendeur ou à l'adresse de service. La garantie comprend la réparation de tous les dommages ou pannes de l'outil qui se sont produits pendant le délai de garantie et qui sont dues à des vices de matériel ou de fabrication. Cette garantie correspond à un emploi normal de l'outil et exclu les avaries dues à un mauvais usage, à un entretien défectueux ou à l'usure normal.

## 2 years Guarantee Jetwax.

The guarantee document is only valid when accompanied by proof of purchase. Please deposit both in a safe place. In the case of claims under guarantee, or for repair, please refer to your dealer, or to the service-address. The guarantee covers all defects or damages of the product during the guarantee period evidently due to defaults in workmanship or material and is limited to repair and/or adjustment. Defects which are due to normal wear and tear, overstressing, unsuitable accessories or misuse are not covered by this guarantee.